


FRENTE

Tiradores elásticos regulables

Bandas laterales y regulables

Malla elastizada Reforzada

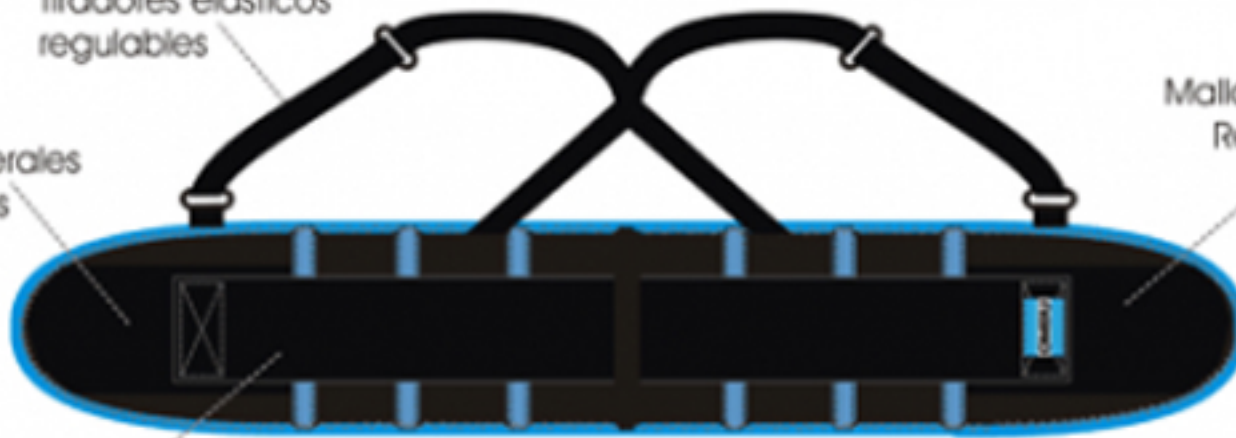

Gran superficie de ajuste en el cuerpo principal

REVERSO

Ballenas en la parte posterior provista con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento


Velcro de alta Resistencia



MODO DE COLOCACION



1 Tomando ambos extremos de la faja, tensiónelos hasta que se crucen al frente. Deje sueltas las bandas exteriores.

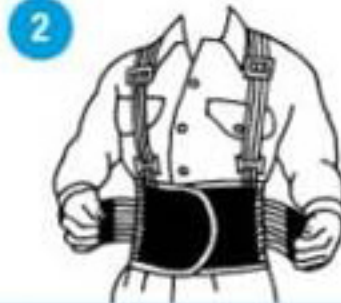

2 Tome las bandas exteriores y tire hacia adelante y al centro, de acuerdo a su comodidad y el esfuerzo a realizar.



3 Ajuste la altura de los tiradores con los clips, hasta que la faja quede bien calzada en la cintura.



4 Siéntase cómodo y protegido con la Faja Lumbar OMBU.